

Fit Test® C & B

ADDITIONSVERNETZENDES SILIKON FÜR DIE KONTROLLE PROTHETISCHER REKONSTRUKTIONEN

Fit Test C & B ist jahrzehntelang am Markt bewährt und stellt für Sie als Zahnärztin bzw. Zahnarzt eine diagnostische Hilfe zur optimalen Einpassung der endgültigen Restauration dar. Durch die blaue Einfärbung ist es möglich, Störstellen sowohl bei Metall- als auch bei Vollkeramikrestaurationen sicher zu erkennen. Fit Test C & B überzeugt durch eine einfache Handhabung und eine besonders hohe Reißfestigkeit.

Mit Fit Test C & B erkennen Sie frühzeitig Passungenauigkeiten.

Für Sie bedeutet dies: Zeit- und Kostenersparnis, da Sie schneller das perfekte Ergebnis erreichen und keine Korrekturen an prothetischen Arbeiten mehr durchführen müssen.

Dem Patienten wird ein hohes Maß an Komfort geboten, da die prothetische Versorgung sofort perfekt sitzt und nicht mehr nachversorgt werden muss.

Indikationen

Kontrolle von Passgenauigkeit, Randschluss und Randspalt bei:

- Voll- und Teilkronen
- Inlays / Onlays
- Gegossenen Stiftaufbauten
- Stiftkronen
- Brücken
- Metallbasen
- Implantatgestützten Kronen und Brücken
- Attachments und anderen Sekundärteilen in Prothesen


Klinischer Fall



1 Ausgangssituation nach erfolgter Präparation



2 Befüllen der Kronenlumen mit Fit Test C & B

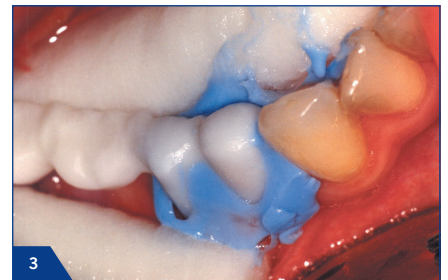


3 Anschließendes Eingliedern und Abbinden in situ



4 Entnahme der Restauration nach Ende der Abbindezeit



5 Darstellung von Passungenauigkeiten sowohl in der Restauration ...

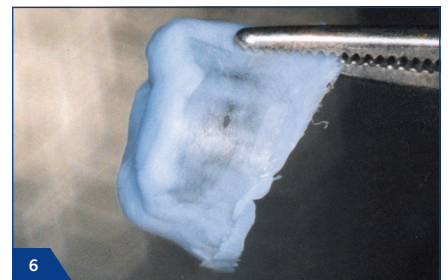

6 ...als auch nach Entnahme von Fit Test C & B

Quelle: Dr. Arne Kersting, Cuxhaven

Fit Test® C & B

ADDITIONSVERNETZENDES SILIKON FÜR DIE KONTROLLE PROTHETISCHER REKONSTRUKTIONEN

Vorteile

- Schnelle, diagnostische Hilfe bei allen Restaurationen
- Einfache Handhabung durch QuickMix Spritze – automatisches und fehlerfreies Anmischen
- Kurze Mischkanüle für geringen Materialverlust
- Direkte Applikation
- Minimale Schichtstärke
- Optimale Farbgebung für Metall- und Keramikrestaurationen
- Schnelles Ergebnis durch kurze Verarbeitungs- und Abbindezeiten
- Leichtes, rückstandsloses Entfernen



Handelsformen

REF 2095 QuickMix Spritze 5 ml, Mischkanülen Typ 9

REF 2188 Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice
Tel.: +49 (0) 4721-719-1111
Fax: +49 (0) 4721-719-109
service@voco.de

Zu beziehen durch: